

Procédure d'installation du photomètre USB


(pour utilisation avec le logiciel VoxPatterns en mammographie)



Cette procédure n'est pas nécessaire lors d'une mise à jour.


Attention : Cette procédure s'applique uniquement au photomètre USB de type « puck » de la compagnie X-Rite.

1. S'assurer que les **fichiers associés au pilote du photomètre** sont bien dans le dossier :

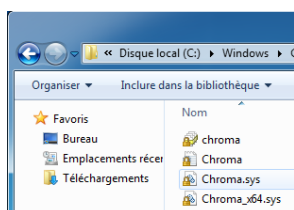


« C:\Windows\Chroma signed USB drivers ».


2. **Brancher le photomètre** dans une prise USB de l'ordinateur.
3. Sélectionner « **Gérer** » dans le menu contextuel de l'icône « Ordinateur ».

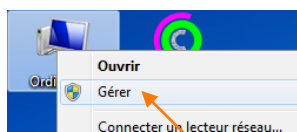


4. Sélectionner « **Gestionnaire de périphériques** », puis clic droit sur « **Calibrator** » et choisir « **Mettre à jour le pilote** ».

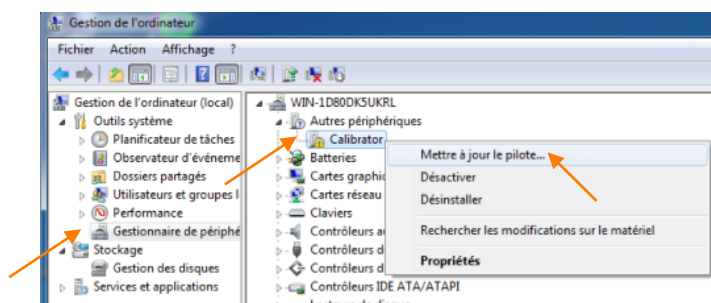


5. Cliquer sur « **Rechercher un pilote sur mon ordinateur** ».

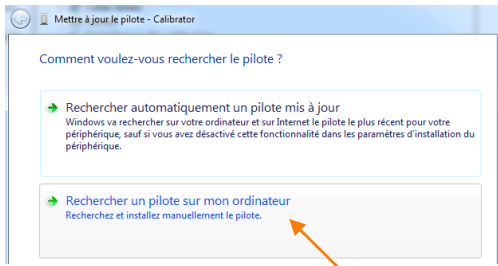


6. Cliquer sur « **Parcourir** », puis naviguer jusqu'au dossier « C:\Windows\Chroma signed USB drivers » et **cliquer sur ce dossier pour le sélectionner**, puis cliquer sur « **OK** ».

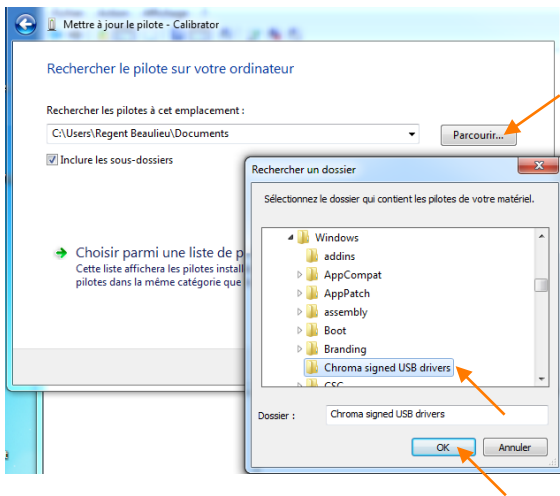

7. Cliquer sur « **Suivant** ».

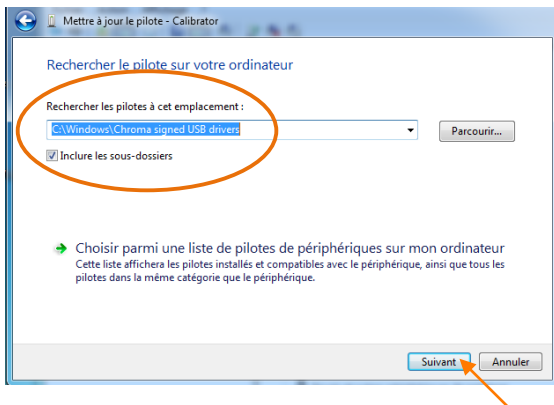

8. Cliquer sur « **Installer** ».

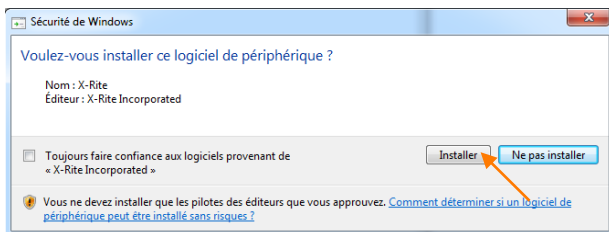

9. Une fenêtre s'affiche indiquant que Windows a mis à jour votre pilote. Vous pouvez alors fermer cette fenêtre et celle de gestion de l'ordinateur.